


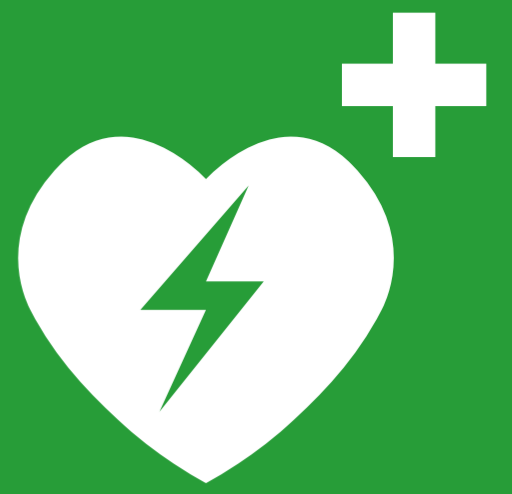

ERSTE HILFE

bei Herzstillstand mit einem Defibrillator (AED)



HERZNOTFALL

Eigene Sicherheit beachten!
Informieren Sie weitere Personen

P = Prüfen Sie auf Lebenszeichen/
ob Atmung vorhanden ist

R = Rufen **NOTRUF 112**

D = Drücken

D = Defibrillieren (Lassen Sie sich
einen Defibrillator bringen.)

Weisen Sie Rettungskräfte ein!

AED-INFORMATIONEN

Standort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

1 PRÜFEN

1.1 Laut ansprechen und anfassen.

1.2 Atmung prüfen (sehen, hören, fühlen)

Stabile Seitenlage herbeiführen

2 RUFEN

2.1 Notruf absetzen und Defibrillator holen lassen

3 DRÜCKEN

3.1 Oberkörper freimachen

3.2 Sofort mit Kompressionen beginnen

**5-6 CM TIEF DRÜCKEN
100-120 X PRO MIN.**

4 DEFIBRILLIEREN

4.1 Zum Einschalten grüne Taste drücken

4.2 Elektroden aus rückseitigem Fach entnehmen

4.3 Elektroden befestigen

4.4 Nach Aufforderung Schocktaste drücken

4.5 Anweisungen des Defibrillators folgen und nach Aufforderung Kompressionen wie in Abb. 3 dargestellt fortsetzen



defibtech

Defib Deutschland GmbH
Kaiser-Friedrich-Ring 61
40547 Düsseldorf
+49 (0) 211-9753299-0
info@defibdeutschland.de

