


ZUSATZ ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG: ZUGRIFFSCHUTZ (NUR DDU-2400)

MANUELLEN MODUS AUSWÄHLEN



Zur Auswahl des manuellen Modus drücken Sie die untere Softkey-Taste neben dem **Symbol zur Auswahl der Betriebsart** (links dargestellt). Es erscheint der Bildschirm für die **Betriebsart** (rechts dargestellt).

Drücken Sie die entsprechende (mittlere) Softkey-Taste, um den **Manuellen modus** auszuwählen.

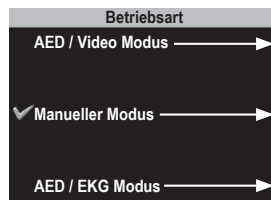

Bildschirm für die Betriebsart

ZUGRIFFSCHUTZ (auf Geräten des Typs DDU-2400 mit Software-Version 2.4 oder höher; Geräte mit früheren Software-Versionen gehen direkt in den manuellen modus, wenn dieser auf dem Bildschirm für die Betriebsart ausgewählt wurde): Wenn die Softkey-Taste für den manuellen modus gedrückt wird, fordert der AED Sie dazu auf, zu bestätigen, dass Sie in den manuellen modus wechseln möchten. Wenn Sie die untere Softkey-Taste in der Nähe des roten „X“-Symbols drücken, wird der Vorgang abgebrochen und Sie gelangen zurück auf den Bildschirm für die Betriebsart. Wenn Sie die obere Softkey-Taste drücken, gelangen Sie in den manuellen modus. **(HINWEIS: Als zusätzliche Sicherheit gibt es auf dem Bildschirm kein Symbol, um den Wechsel in den manuellen modus zu bestätigen.)**



← Drücken, um in den manuellen modus zu wechseln



← Drücken, um den manuellen modus abzubrechen

GEBRAUCH DES MANUELLEN MODUS

Durch Drücken der Softkey-Tasten mit den entsprechenden Symbolen kann der Anwender im manuellen modus folgendes ausführen:

150J

Energiewahl: Wählen Sie den gewünschten Energielevel aus (obere Taste).



LADEN: Startet den Ladevorgang (mittlere Taste).



ENTLADEN: Bricht den Ladevorgang ab (mittlere Taste, nachdem ein Ladevorgang gestartet wurde).



Bildschirm Manueller Modus

Drücken Sie nach Abschluss des Ladevorgangs die blinkende SCHOCK-Taste.